

LENS CARE

**rastvor za pranje, uklanjanje naslaga proteina i lipida, dezinfekciju, vlaženje i
čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih sočiva
100ml i 380ml**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Namena

LENS CARE je namenjen za čišćenje, uklanjanje naslaga proteina i lipida, dezinfekciju, vlaženje i čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih sočiva. Namenjen je za upotrebu kod osoba koje nose meka sočiva (odrasli i deca), koje su strogo indikovani od strane stručnjaka za negu sočiva (oftalmologa) u cilju korekcije vidne oštine. Strukture oka koje su u bliskom kontaktu sa rastvorom LENS CARE su konjunktiva i rožnjača.

Način primene

Dobro opranim i osušenim rukama izvaditi sočivo iz oka, staviti na dlan i naneti po 3 kapi Lens care rastvora na obe strane sočiva. Uzeti sočivo palcem i kažiprsom i blagim pokretima istrljati, dobro isprati i staviti u kutiju sa rastvorom Lens care. Postupak ponoviti sa drugim sočivom. Ostaviti sočiva potopljena u Lens care rastvoru najmanje 10 minuta. Nakon toga, sočiva će biti čista i dezinfikovana i mogu se postaviti direktno, bez prethodnog ispiranja, u oko.

Mere opreza (kontraindikacije i neželjene nus pojave)

- Rastvor ne koristiti ako je sigurnosni prsten na zatvaraču oštećen;
- Ako stoje duže od 30 dana u rastvoru Lens care, sočiva treba podvrgnuti gore navedenom postupku pranja.
- Nakon čuvanja sočiva u kasetici sa Lens care rastvorom više časova (npr. preko noći) sočiva treba oprati gore navedenim postupkom pranja, pre stavljanja u oči.
- Rastvor ne koristiti nakon isteka roka trajanja, kao ni 2 meseca nakon otvaranja.
- Ne dodirivati vrh kapaljke boce Lens care rastvora da ne bi došlo do kontaminacije rastvora.
- Rastvor ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koju komponentu rastvora
- Neophodno je poštovati sva upozorenja, mere opreza i uputstvo za upotrebu kako bi Lens care rastvor bio siguran i bezbedan za upotrebu.

- U toku korišćenja mekih kontaktnih sočiva čuvanih u Lens care rastvoru kod pojedinih osoba se retko mogu desiti: otok, crvenilo ili infekcija oka, alergijske reakcije ili blaga prebojenost rožnjače. U tom slučaju odmah prekinuti upotrebu Lens care rastvora i obratiti se oftalmologu.

- Opšte mere predostrožnosti koje generalno daju oftalmolozi kada se koriste meka kontaktna sočiva i rastvor za sočiva su: peckanje i/ili svrab u oku, nelagodnost, osećaj nečega u oku (strano telo, izgrebano mesto), prekomerno suzenje, neobičan sekret oka ili crvenilo, loš vid, zamagljen vid, duge ili oreoli oko predmeta, osetljivost na svetlost ili suve oči. U tom slučaju odmah se obratiti oftalmologu

Upozorenje

- rastvor se može koristiti striktno prema uputstvu oftalmologa
- Lens care rastvor čuvati dobro zatvoren, van domašaja dece;
- u slučaju iritacije očiju, prekinuti upotrebu rastvora i javiti se očnom lekaru;
- uvek proveriti rok trajanja pre upotrebe;
- rastvor Lens care ne mešati sa drugim rastvorima za pranje i dezinfekciju sočiva.
- zbog mogućnosti bakteriološke kontaminacije kasetica usled neadekvatne upotrebe, preporučuje se da se kasetice menjaju bar na tri meseca, a optimalno je mesečno.

Sastav

Polyhexanid 0,0001% (tež/tež), puferovan i izotoniziran
Lens care je sterilan rastvor, izrađen aseptičnim postupkom i sterilisan filtracijom kroz mikrobiološki filter otvora pora 0,22µm.

Obaveštenje

Svaki ozbiljan štetni događaj do koga je došlo u vezi s Lens care rastvorom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom telu države u kojoj se korisnik nalazi (u Srbiji Agenciji za lekove, a u zemljama EU EUDAMED-u)

Proizvođač: Pharma product doo, Koste Glavinića 2, Beograd, Srbija

Ovlašćeni predstavnik u EU: TNMC Devices LLC, Ulica Franje Krežme 1, 10000 Zagreb, Croatia

Broj rešenja: 001795105 2024

Datum poslednje revizije uputstva

Oktobar 2025.

CE 1304

Broj sertifikata MDR-0020

Važi od 2025-10-03 do 2029-10-23

KASETICA ZA ODLAGANJE/ČUVANJE SOČIVA U LENS CARE RASTVORU

Kasetica za sočiva je sastavni deo pakovanja LENS CARE rastvora. Izrađena je od veštačkog polimernog materijala (polypropylene homopolymer) plavo-bele boje i namenjena je za čuvanje mekih kontaktnih sočiva u LENS CARE rastvoru. Ima dve kadice sa poklopcima na zavrtnj i oznakama za sočivo za levo („L“) i desno oko.

Uputstvo za upotrebu

Postupak pri odlaganju sočiva u kaseticu

Skinuti poklopac sa oznakom „L“ pa u otvorenu kadicu kasetice staviti sočivo iz levog oka, nakon propisanog postupka pranja, i sipati LENS CARE rastvor u kadicu do vrha. Zatim, vratiti poklopac i dobro ga zatvoriti. Ovaj postupak ponoviti sa sočivom iz desnog oka. Do sledeće upotrebe, sočiva se čuvaju u kasetici, potopljena u Lens care rastvoru.

Postupak pri uzimanju sočiva iz kasetice

Odvrnuti poklopac sa oznakom „L“, izvaditi sočivo, po propisanom postupku ga oprati i staviti u oko. Sadržaj LENS CARE rastvora iz kasetice odbaciti. Ovaj postupak ponoviti sa sočivom za desno oko.

Do sledeće upotrebe, kasetica se, nakon ispiranja obe kadice Lens care rastvorom (2 puta), dobro zatvori poklopcima i čuva van domašaja dece.

Zbog mogućnosti bakteriološke kontaminacije kasetica, usled neadekvatne upotrebe, preporučuje se da se kasetice menjaju bar na tri meseca, a optimalno je mesečno.

Proizvođač: Pharma product doo, Koste Glavinića 2, Beograd, Srbija

Ovlašćeni predstavnik u EU: TNMC Devices Llc, Ulica Franje Krežme 1, 10000 Zagreb, Croatia

Broj rešenja: 001795105 2024

Datum poslednje revizije uputstva
Oktobar 2025.

CE 1304

Broj sertifikata MDR-0020

Važi od 2025-10-03 do 2029-10-23